



www.aafdobrasil.com.br

AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Scarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira
Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410040

BICARBONATO DE SÓDIO

Material para Limpeza e Polimento dos Dentes e Próteses

1. Descrição do Produto

O BICARBONATO DE SÓDIO AAF do BRASIL é um pó abrasivo de alta pureza e granulometria superfina, utilizado para profilaxia bucal com remoção da placa bacteriana.

2. Apresentação

1 Frasco com 100g, 200g ou 500g, Natural ou Morango de BICARBONATO DE SÓDIO AAF

3. Composição

BICARBONATO DE SÓDIO
Fórmula molecular - NaHCO_3

4. Indicação de Uso

É indicado para o uso em jateamento pelo profissional para a remoção da placa bacteriana, em função das dificuldades dos pacientes em fazer uma escovação eficiente, de modo a manter baixo, constantemente, o índice de placa, compatível com a saúde dental. Com sua granulometria superfina proporciona jateamento amplo.

5. Ação do Produto

É esperada a remoção de placas e manchas e o subsequente polimento das superfícies dentárias.
O impacto de partículas sólidas na forma de cristais de carbonato de sódio proporciona a remoção da placa bacteriana através do sistema de jato de ar abrasivo.
O Bicarbonato de Sódio neutraliza a acidez, combatendo diretamente a proliferação de bactérias causadoras de placa bacteriana e do mau hábito.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para Uso

Aplicar o produto nos dentes através do jato de bicarbonato de sódio.
Produto de uso exclusivo do dentista.

8. Contra Indicações

O produto apresenta-se eficaz e seguro para a finalidade a que se destina desde que sejam seguidas as orientações, suas advertências e seu modo uso. O Bicarbonato de Sódio não apresenta contra-indicação de irritação bucal, a não ser em pessoas sensíveis ao Bicarbonato de Sódio.

9. Advertências

Não ingerir;
Não utilizar se o lacre estiver violado;
Não utilizar com prazo de validade vencido;
Manter fora do alcance de crianças;
Somente para uso odontológico;
Manipular de acordo com as instruções;
Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção;
Evitar a inalação e o contato com pele e os olhos.

10. Cuidados especiais

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.
Recomenda-se o uso de luvas, máscara e óculos de proteção.

11. Manipulação

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

12. Interações: Não há.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br
www.aafdobrasil.com.br

