



AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410040

www.aafdobrasil.com.br

CARIOSTATIC AAF

Agente Inibidor da Carie Dental

1 Descrição do Produto

Solução a base de diamino fluoreto de prata, largamente utilizado na odontologia como agente inibidor da cárie dental.

2. Apresentação

1 frasco com 5 ou 10 ml de CARIOSTATIC AAF 12% e 30%

3. Composição

Nitrato de Prata, Hidróxido de Amônio, Ácido Fluorídrico e Veículo aquoso.

4. Indicação de Uso

Indicado como inibidor da cárie dental, impedindo a formação da placa bacteriana e a desmineralização da superfície do esmalte. Evita a progressão da cárie já instalada. Utilizado especialmente para cárie em crianças e de mamadeira noturna. Atua tanto no esmalte quanto na dentina.

5. Ação do Produto

O tratamento da cárie como solução de diamino fluoreto de prata, que é cariostática e preventiva, não sendo invasiva e portanto sem restauração cavitária, é um importante aliado na recuperação da saúde bucal de crianças menores. O diamino fluoreto de prata forma com a superfície dentária, compostos estáveis de fluoreto de cálcio, fosfato de prata e proteinato de prata, que conferem maior resistência à estrutura dentária.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA
AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para Uso em endodontia:

- Realizar a limpeza do dente;
 - Proteger os tecidos moles ao redor com vaselina ou isolamento absoluto;
 - Aplicar o produto (2 – 3 minutos);
 - Lavar o dente.
- Forma de tratamentos:
- Tratamento inicial: realizar uma aplicação por semana, durante quatro semanas.
 - Tratamento de manutenção: realizar uma aplicação a cada seis ou doze meses, dependendo da necessidade.

8. Contra Indicações

Não há contra indicações.

Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

9. Advertências

Não ingerir;

Não utilizar com prazo de validade vencido;

Manter fora do alcance de crianças;

Somente para uso odontológico;

Manipular de acordo com as instruções.

10. Cuidados especiais

Impedir o contato com a pele e olhos (produto cáustico);

Impedir o contato com tecidos moles. Isolar com dique de borracha ou vaselina.

O produto causa manchas escuras. Proteger mãos, vestimentas e demais áreas de contato durante a aplicação do produto e ao manusear a embalagem.

Utilizar solução de lodo para remover manchas causadas pelo cariostático na pele.

11. Manipulação

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

12. Interações: Não há.



SERVICO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br
www.aafdobrasil.com.br

