



AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410040

www.aafdobrasil.com.br

Eucaliptol

Materiais para Endodontia

Conteúdo 10ml

1. Descrição do Produto

O Eucaliptol é obtido da essência de eucalipto ou de outras fontes produtoras. É um líquido límpido, incolor, de odor aromático, canforáceo, característico, de sabor picante, seguida da sensação de frescura. Praticamente insolúvel na água, miscível com o álcool, clorofórmio, sulfeto de carbono, ácido acético glacial, óleos vegetais e essências. É um líquido que auxilia no retratamento de canais radiculares, agindo como solvente de cones de guta percha.

2. Apresentação

1 frasco com 10ml de EUCALIPTOL USP

3. Composição

EUCALIPTOL USP.....100%

4. Indicação de Uso

Solvente de cones de guta percha, auxiliando na remoção de obturação de canais radiculares.

5. Ação do Produto

Guta Percha são cones obturadores de canais radiculares, destinados a ocupar o espaço elaborado pelos instrumentos.

A guta percha é uma substância amorfa branca, flexível, pouco maleável a temperaturas inferiores a 50°C e solúvel no eucaliptol.

Solubilizando-se no eucaliptol, a guta percha torna-se pastosa, sendo utilizadas na obturação do canal. Estas pastas endurecem com a volatilização dos solventes.

As obturações feitas com cones de guta percha são facilmente removidas pelo uso do eucaliptol, xilol ou clorofórmio, que os dissolvem, com o auxílio da ação dos instrumentos.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para Uso

Dispensar uma gota de Eucaliptol no conduto radicular;
Aguardar em torno de 5 minutos para que ocorra o amolecimento do cone de guta percha;

Com o auxílio de uma lima endodôntica instrumentar e retirar a guta percha;
Dispensar mais uma gota de Eucaliptol quando perceber que o cone de guta percha remanescente estiver seco ou quebradiço;
Repetir a operação até completar a remoção.

8. Contra Indicações

Não há contra indicações.

Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto.

9. Advertências

Evitar o contato com a pele e olhos;

Não ingerir;

Não utilizar com prazo de validade vencido;

Manter fora do alcance de crianças;

Somente para uso odontológico;

Manipular de acordo com as instruções.

10. Cuidados especiais

Evitar o contato com a pele e os olhos.

Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. Interações: Não há.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br

www.aafdobrasil.com.br

