



AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320
Reg. ANVISA nº 80432410034

www.aafdobrasil.com.br

Eugenol

Cimento Odontológico

Conteúdo 20ml

1. Descrição do Produto

O Eugenol é um derivado fenólico conhecido como óleo de cravo. O Eugenol tem grande emprego na odontologia devido às suas qualidades analgésicas, antissépticas e balsâmicas, anti-inflamatórias, cicatrizante. É também eficaz na eliminação de bactérias presentes na boca. Seus efeitos são completos e dependem da concentração de Eugenol livre sobre o local onde é exposto.

2. Apresentação

1 frasco contendo 20ml de Eugenol.

3. Composição

Eugenol (99 a 100,5%).....100%

4. Indicação de Uso

Utilizado juntamente com o Óxido de Zinco, é indicado como:

Agente de obtenção provisória;

Forramento cavitário, em cavidades profundas;

Agente para cimentação provisória ou permanente;

Agente para obtenção de canais radiculares, como cimento cirúrgico.

5. Ação do Produto

O Eugenol em baixas concentrações apresenta:

Efeito sedativo, por inibir a atividade nervosa de forma reversível, como um anestésico local;

Efeito anti-inflamatório, por inibir as quimiotaxias dos neutrófilos e a geração de anion superóxido;

Efeito bactericida, por estabilizar as membranas celulares, o que previne a penetração das bactérias nos ductos dentinários.

6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)

7. Instruções para uso

Gotejar Eugenol sobre uma placa;

Dispensar o Óxido de Zinco sobre a placa e dividir em quatro partes;

Juntar o pó ao líquido, por partes, utilizando uma área ampla da placa;

Espalhar até obter uma massa homogênea e lisa. Prosseguir até conseguir a consistência desejada.

8. Contra Indicações

Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto;

Não deve ser utilizado em gestantes;

Pode ocorrer sensação picante ou de queimadura quando em contato com a mucosa;

Pode provocar irritação na pele;

Pode provocar distúrbios gástricos quando utilizado o cimento cirúrgico por várias semanas.

9. Advertências

Evitar o contato com a pele e olhos; Não ingerir; Não utilizar com prazo de validade vencido; Manter fora do alcance de crianças; Somente para uso odontológico; Manipular de acordo com as instruções.

10. Cuidados especiais

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.

Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

11. Manipulação

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

12. Interações:

Os vapores do Eugenol pode alterar as propriedades químicas e físicas de cimentos (de silicato e ionômero de vidro) e resinas. Armazenar o Eugenol em local separado destes materiais.



SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br
www.aafdobrasil.com.br

