

# Inter-A

## Material Restaurador Temporário

### 1. Descrição do Produto

O INTER-A é uma formulação modificada do cimento de Óxido de Zinco e Eugenol oferecendo ao produto características como um endurecimento mais rápido, facilidade de manipulação, coloração compatível, boa resistência e biocompatibilidade (isento de Arsênio solúvel).

### 2. Apresentação

PÓ: 1 frasco com 38g de INTER-A. LÍQUIDO: 1 frasco com 15mL de INTER-A

### 3. Composição

PÓ: Óxido de Zinco, Polimetacrilato de Metila  
LÍQUIDO: Eugenol, Ácido Acético

### 4. Indicação de Uso

Forramento de cavidades; Obturação Sedativa Provisória; Cimentação Provisória de Peças Protéticas; Obturações de Canais; Cimentação Cirúrgica.

### 5. Ação do Produto

No INTER-A a resistência é modificada em relação aos cimentos comuns de Óxido de Zinco e Eugenol devido a adição de resina acrílica à formulação.

A opacidade é oferecida ao produto pelo Dióxido de Titânio que também proporciona uma coloração mais compatível com a dos dentes, pois ao natural o Óxido de Zinco tem cor amarelada ou acinzentada, somada ao do Eugenol, que também é amarelada.

A reação de presa é acelerada no INTER-A, ficando em torno de 4 a 5 minutos a 25°C. Este tempo é maior que os cimentos de Oxido de Zinco e Eugenol. O endurecimento mais rápido é proporcionado pelo Ácido Acético Glacial, contido no líquido, que age com um catalisador na reação ácido/base, onde o eugenol doa hidrogênio para o óxido de zinco. O endurecimento rápido oferece uma agilidade no trabalho com a obturação da cavidade em menor tempo.

## 6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA AMBIENTE (15 A 30°C)

## 7. Instruções para Uso

Colocar o pó sobre uma placa de vidro e dividir em três partes iguais;  
Gotejar a quantidade desejada de líquido sobre a placa;  
Juntar o pó ao líquido, por partes. Espatular após a adição de cada parte de pó, obtendo uma mistura homogênea;  
Após adição da última parte espatular até obter um cimento homogêneo e com pouca aderência na placa.

## 8. Contra Indicações

Não utilizar o líquido do INTER-A isoladamente;  
Não deve ser utilizado em pessoas com comprovada sensibilidade ao produto;  
Pode ocorrer sensação picante ou de queimadura quando em contato com a mucosa;  
Pode provocar irritação na pele;  
Pode provocar distúrbios gástricos quando utilizado o cimento cirúrgico por várias semanas.

## 9. Advertências

Evitar o contato com a pele e olhos; Não ingerir; Não utilizar com prazo de validade vencido; Manter fora do alcance de crianças; Somente para uso odontológico; Manipular de acordo com as instruções.

## 10. Cuidados especiais

Evitar a inalação e o contato com a pele e os olhos.  
Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

## 11. Manipulação

Após o uso manter a embalagem bem fechada.

## 12. Interações: Não há.



SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | [sac@aafdobrasil.com.br](mailto:sac@aafdobrasil.com.br)

[www.aafdobrasil.com.br](http://www.aafdobrasil.com.br)

