



AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.  
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136  
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra  
CEP 86031-216 - Londrina - Londrina - PR  
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

www.aafdobrasil.com.br

Responsável Técnica:  
Fabiane Batista de Lima Santos - CRF/PR nº 022320  
Reg. ANVISA nº 80432419004

## ÓLEO DE LARANJA

### Material para Endodontia

Conteúdo 10ml

#### 1. Descrição do Produto

O Óleo de Laranja AAF é utilizado no tratamento endodôntico auxiliando na desobstrução de canais radiculares.

#### 2. Apresentação

1 frasco com 10mL de Óleo de Laranja AAF.

#### 3. Composição

Óleo de Laranja (Terpeno de Laranja).

#### 4. Indicação de Uso

O Óleo de Laranja AAF é utilizado no tratamento endodôntico como solvente de Guta-Percha e dos cimentos obturadores, auxiliando na desobstrução de canais radiculares.

#### 5. Ação do Produto

O Óleo de Laranja AAF é um solvente químico extraído da casca da laranja doce, é volátil e possui como principal característica não ser tóxico ao profissional, paciente e meio ambiente.

Na odontologia é utilizado como solvente de Guta-Percha e cimentos obturadores, além de ser eficaz na desobstrução de canal radicular obturado com cimento de óxido de zinco+eugenol.

#### 6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA  
AMBIENTE (15 A 30°C)

#### 7. Instruções para Uso em endodontia:

Retirar a restauração por método mecânico, até a entrada do canal radicular;  
Dispensar 1 a 2 gotas de Óleo de Laranja AAF na entrada do canal radicular e aguardar de 5 a 10 minutos;  
Após o tempo de ação, com o auxílio de uma lima endodôntica ou por meio de alargadores, realizar leves movimentos de penetração e introduzir o instrumento no interior do cimento efetuando a remoção;  
Dispensar o Óleo de Laranja AAF na medida necessária;  
Ao término da remoção do material obturador, irrigar o canal com solução tensoativa.

#### 8. Contra Indicações

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

#### 9. Advertências

Não utilizar com prazo de validade vencido;  
Manter fora do alcance de crianças;  
Uso exclusivo do cirurgião dentista.

#### 10. Cuidados especiais

Evitar inalação excessiva de vapores concentrados.  
Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

#### 11. Manipulação

Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;  
Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

#### 12. Interações: Não há.



SERVIÇO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br  
www.aafdobrasil.com.br

