



www.aafdobrasil.com.br

AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.  
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136  
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra  
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR  
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira  
Responsável Técnica:  
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320  
Reg. ANVISA nº 80432410040

## PAPEL CARBONO

### Papel Carbono para Articulação

#### 1. Descrição do Produto

Papel Carbono para Articulação.

#### 2. Apresentação

Bloco de 12 folhas com lâminas de papel carbono para articulação em forma de tira ou em forma de ferradura para arcada total, dupla face nas cores azul/azul, azul/vermelho.

#### 3. Composição

Papéis especiais; Ceras Vegetais; Pigmentos; Óleos Vegetais; Parafina e Vaselina.

#### 4. Indicação de Uso

É indicado para o registro das áreas de contato entre dentes antagonistas, permitindo o correto ajuste oclusal das superfícies das restaurações dentárias. É indicado como auxiliar na correta montagem de dentes artificiais em próteses parciais removíveis e em próteses totais.

#### 5. Ação do Produto

O PAPEL CARBONO é utilizado para marcação de pontos oclusais, possibilitando melhor identificação das regiões para acabamento em restaurações e superfícies dentais.

#### 6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA  
AMBIENTE (15 A 30°C)

#### 7. Instruções para Uso

1- Faça a introdução do PAPEL CARBONO AAF do BRASIL na boca do paciente ou no modelo de gesso;  
2- Pedir ao paciente ocluir para marcação dos pontos de contato oclusais; ajustes com instrumentos adequados se preciso.  
IMPORTANTE: Para obtenção de um melhor resultado do produto, secar as superfícies dentais para permitir que a tinta do papel carbono marque os pontos de contato de forma nítida e sem borrões.

#### 8. Contra Indicações

O produto não apresenta contra indicações.

#### 9. Advertências

Manter fora do alcance de crianças;  
Somente para uso odontológico;  
Manipular de acordo com as instruções;  
Aplicar o produto usando luvas, máscara e óculos de proteção;  
Não ingerir;  
Utilizar somente uma vez.

#### 10. Cuidados especiais

Não há.

#### 11. Manipulação

Após o uso manter o bloco do produto protegido da luz, calor e umidade.

#### 12. Interações: Não há.



SERVÍCIO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br  
www.aafdobrasil.com.br

