



www.aafdobrasil.com.br

AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli.  
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136  
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra  
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR  
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:  
Fabiana B. L. Santos CRF/PR nº 022320  
Reg. ANVISA nº 80432410028

## Retraf

Conteúdo 250 cm

### 1. Apresentação

Frasco contendo 250 cm de Retraf em 5 espessuras:  
000-Preto - 00-Amarelo - 0-Lilás - 1-Azul - 2-Verde - 3-Vermelho

### 2. Composição

Fio de algodão trançado 100%

### 3. Indicação de Uso

É indicado para retrair a gengiva em vários procedimentos dentais, facilita a manipulação de infusões dentárias, o acesso e a visibilidade de todo o tecido gengival, além de ajudar a prevenir danos no tecido gengival durante a confecção dos preparos cavitários.

### 4. Modo de Uso

1. Cortar um pedaço de Fio no comprimento desejado  
Obs: O fio poderá ou não ser embebido em solução hemostática/retratora para obter uma maior retração.
2. Posicionar o fio ao redor do colo do dente, e introduzir no sulco comprimindo com cuidado utilizando uma espátula sem a extremidade cortante. (Iniciar pelo espaço interproximal onde o sulco geralmente é mais profundo e então proceder a volta completa do dente no sentido horário).
3. Se necessário, para facilitar a remoção, umedecer ligeiramente o fio retrator com água.  
Obs: Não retirar o fio até imediatamente antes da tomada da impressão.

### 5. TEMPO IDEAL DE PERMANÊNCIA DO PRODUTO:

Não utilizando solução hemostática/retratora, o tempo ideal de permanência do produto para a obtenção da retração é de pelo menos 5 minutos.

Quando utilizar solução hemostática/retratora, seguir o tempo indicado nas instruções de uso da solução.

Em moldagens, deixar o fio posicionado até imediatamente antes da tomada da impressão.

### 6. Advertências:

Não ingerir;  
Não utilizar com prazo de validade vencido;  
Manter fora do alcance de crianças;  
Somente para uso odontológico;  
Utilize o produto somente sobre gengiva sadia;  
Utilize o produto conforme indicado nas Instruções de uso.  
Produto de uso exclusivamente profissional.

### 7. Precauções:

Descartar após o uso.

### 8. Condições de Armazenamento e Transporte:

Armazenar em local fresco e seco a temperatura ambiente (15° - 30°). A umidade deve ser mantida numa faixa entre 35% UR e 70% UR.  
Não requer condições especiais de transporte. Transportar na embalagem original do produto.



SERVICO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | sac@aafdobrasil.com.br  
www.aafdobrasil.com.br

