



AAF do Brasil Prod. Odontológicos Eireli,  
Rua Damaris R. M. Monteiro, 136  
Pq. Tecnológico Francisco Sciarra  
CEP 86031-216 - Lindóia - Londrina - PR  
CNPJ 04.356.658/0001-91 - Indústria Brasileira

Responsável Técnica:  
Fabiane Batista de Lima Santos CRF/PR nº 022320  
Reg. ANVISA nº 80432419005

[www.aafdobrasil.com.br](http://www.aafdobrasil.com.br)

## VIPLAK

### Evidenciador de Placas

Conteúdo 10ml

#### 1 Descrição do Produto

O VIPLAK é utilizado para evidenciar placas bacterianas nos dentes. Composto por Fucsina Básica onde tem um maior poder de corar a placa bacteriana no dentes, mesmo em dentes aparentemente limpos.

O VIPLAK também favorece a Instrução de higienização bucal.

#### 2. Apresentação

1 frasco com 10mL de VIPLAK.

#### 3. Composição

Fucsina Básica 0,7%; Álcool Etilico e Água Deionizada.

#### 4. Indicação de Uso

O VIPLAK é indicado para evidenciar placa bacteriana.

#### 5. Ação do Produto

O VIPLAK confere ao produto um maior poder de corar placa bacteriana, nos dentes aparentemente limpos, de uma cor que contraste com os dentes. Este artifício não só facilita a localização de placa, favorecendo também a instrução de higienização bucal.

#### 6. Conservação / Armazenamento:



ARMAZENAR EM LOCAL SECO A TEMPERATURA  
AMBIENTE (15 A 30°C)

#### 7. Instruções para Uso em endodontia:

Aplicação tópica:

Umedecer o cotonete ou bolinha de algodão com VIPLAK e aplicar em todas as superfícies dentais;

Depois fazer um bochecho com água para retirar o excesso.

Bochecho:

Colocar em um copo aproximadamente 6ml de água, adicionar 1ml (aproximadamente 16 gotas) de VIPLAK, bochechar durante 1 minuto e dispensar; Depois fazer bochecho com água para retirar os excessos.

OBSERVAÇÃO:

Todas as áreas que ficarem coradas identificam a presença de placa bacteriana, devendo ser removida pelo uso da escova dental e fio dental.

VIPLAK pode ser utilizado diariamente, preferencialmente na última escovação dentária.

#### 8. Contra Indicações

Contraindicado para pessoas com relatada sensibilidade a algum dos componentes do produto.

#### 9. Advertências

Não utilizar com prazo de validade vencido;

Manter fora do alcance de crianças;

Uso exclusivo do cirurgião dentista.

#### 10. Cuidados especiais

Evitar inalação excessiva de vapores concentrados.

Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas.

#### 11. Manipulação

Para a manipulação do produto o profissional deve usar luvas e óculos de proteção;

Descartar o produto de acordo com a legislação vigente no país.

#### 12. Interações: Não há.



SERVÍCIO DE  
ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR

+55 43 3158.2886 | [sac@aafdobrasil.com.br](mailto:sac@aafdobrasil.com.br)

[www.aafdobrasil.com.br](http://www.aafdobrasil.com.br)

